

# Praktiker

## ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΝΙΟΥ



Οδηγίες χρήσης



5202650094049



---

**Αγαπητή πελάτισσα,  
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

---

## Περιεχόμενα

<b>Πριν ξεκινήσετε...</b> .....	<b>5</b>
Σωστή χρήση του προϊόντος .....	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται.....	5
Γενικές πληροφορίες - Προειδοποιήσεις .....	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας .....	6
<b>Εξαρτήματα</b> .....	<b>7</b>
<b>Συναρμολόγηση</b> .....	<b>8</b>
<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b> .....	<b>10</b>
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b> .....	<b>10</b>
<b>Απόρριψη προϊόντος</b> .....	<b>10</b>
<b>Απόρριψη συσκευασίας</b> .....	<b>10</b>
<b>Εγγύηση</b> .....	<b>11</b>

---

## Πριν ξεκινήσετε ...

### Σωστή χρήση του προϊόντος

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως κάθισμα στο ντους. Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκλαμβάνεται ως μη ορθή και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.

### Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

#### **Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!**

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.



#### **Σημείωση:**

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

### Γενικές πληροφορίες – Προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν.

---

## Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

---

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

#### Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!











Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά. Κρατήστε τα πλαστικά σακουλάκια μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ασφυξία.

---

- Διατηρήστε το υλικό της συσκευασίας μακριά από παιδιά (κίνδυνος ασφυξίας).
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το σκαμπό μπάνιου! Μπορεί να επιχειρήσουν να σταθούν στο σκαμπό ή να στηριχθούν σε αυτό για να ανέβουν, με αποτέλεσμα να πέσουν μαζί με αυτό.
- Μην στέκεστε όρθιοι πάνω στο σκαμπό. Καθίστε στη σωστή θέση για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.
- Μην μεταφέρετε το άτομο που κάθεται στο σκαμπό σηκώνοντάς το από τις εσοχές που λειτουργούν ως χειρολαβές. Οι δύο πλευρές του σκαμπό μπορεί να σπάσουν ή να κυρτώσουν. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Το μέγιστο βάρος που υποστηρίζει το σκαμπό μπάνιου είναι 150 kg.
- Ελέγξτε το σκαμπό μπάνιου πριν το χρησιμοποιήσετε και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται σταθερά. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αντιολισθητικό υπόστρωμα μέσα και έξω από την ντουζιέρα. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσετε και να τραυματιστείτε.
- Μην παραλείπετε να ελέγχετε τακτικά το σκαμπό όσον αφορά τη σταθερότητά του. Ελέγχετε τις συνδέσεις ώστε να είναι πάντα στη σωστή θέση. Σφίγγετε τις βίδες όταν χρειάζεται.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν και μην το επισκευάζετε μόνοι σας. Για οποιαδήποτε βλάβη επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ορατής ή πιθανής φθοράς.

## Εξαρτήματα

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Κάθισμα	Σωλήνας αλουμινίου	Σωλήνας αλουμινίου	Πόδι

4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
			
Λαστιχένιο κάλυμμα	Ροδέλα	Στρογγυλή βίδα (M6 x 35 mm)	Στρογγυλή βίδα (M6 X 40 mm)


## Συναρμολόγηση

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.



### Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

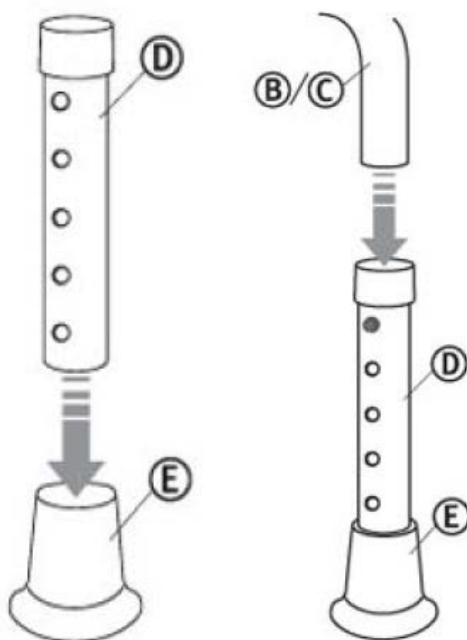

Σχήμα 1


Σχήμα 2

Τοποθετήστε το λαστιχένιο κάλυμμα (E) στο πόδι (D) όπως στο σχήμα 1. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλα τα πόδια του σκαμπό.

Τοποθετήστε τα πόδια με τα λαστιχένια καλύμματα στους σωλήνες (B) (C). Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλα τα πόδια του σκαμπό (Σχήμα 2).

Στερεώστε τους σωλήνες (B)+(C) στο κάτω μέρος του καθίσματος (A). Σφίξτε τους με τις βίδες (G)+(H) τοποθετώντας μια ροδέλα (F) κάτω από κάθε βίδα. Βλ. Σχήμα 3.



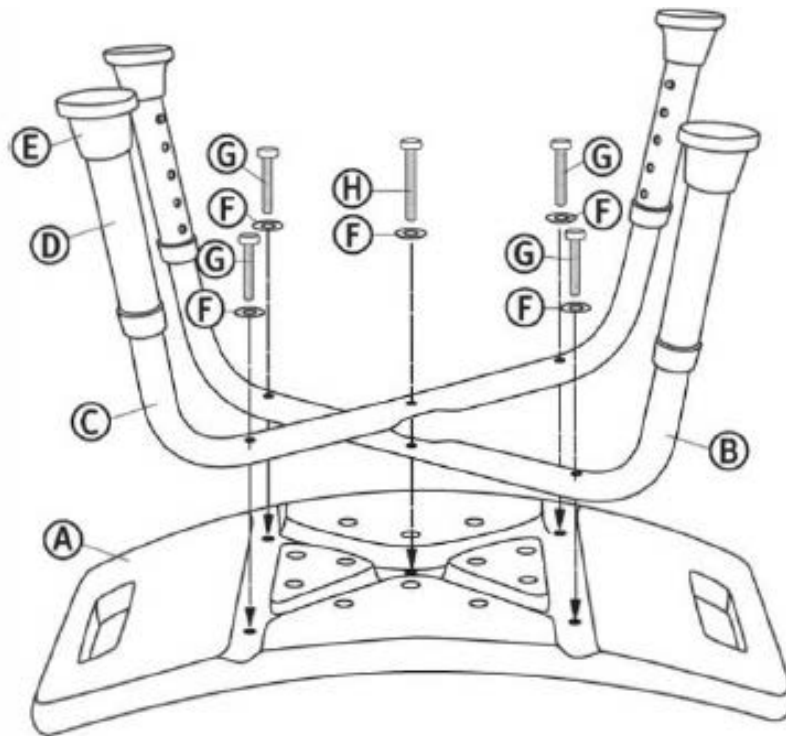


Σχήμα 3

Πατήστε τα κουμπιά που υπάρχουν στα πόδια του σκαμπό (D), για να ρυθμίσετε το επιθυμητό ύψος.

Τα κουμπιά πρέπει να προεξέχουν πλήρως από τις οπές.

Ρυθμίστε όλα τα πόδια στο ίδιο ύψος ώστε να αποφευχθεί τυχόν πτώση. Περιστρέψτε τα λαστιχένια καλύμματα (E) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευθυγραμμισμένα και να ισορροπούν καλά πάνω στη βάση του ντους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής στήριξη του σκαμπό. Βλ. Σχήμα 4.

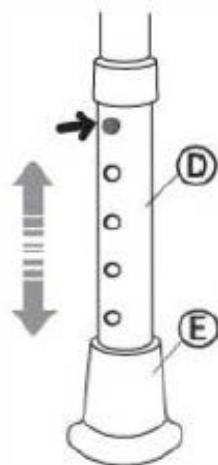

Σχήμα 4

---

## Καθαρισμός και συντήρηση

- Σκουπίστε τυχόν επίμονους λεκέδες με ένα υγρό πανί και μια μικρή ποσότητα ήπιου καθαριστικού, αν χρειαστεί.
- Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρά καθαριστικά ή στιλβωτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες που μπορεί να αλλοιώσουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια καθίσματος: 51 x 31 cm
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 39 - 57 cm
- Βάρος σκαμπό: 1,8 Kg
- Μέγιστο φορτίο: 150 Kg

## Απόρριψη προϊόντος

Το προϊόν απορρίπτεται στους κάδους ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων.

## Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

---

## Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas S.A.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)

**Praktiker Hellas S.A.**  
Πειραιώς 176 - 177 78  
Ταύρος, Αθήνα  
[www.praktiker.gr](http://www.praktiker.gr)